

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločnosťou / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Rampes de fauteuil roulant pliables




Les rampes pliables peuvent être utilisées comme rampes portables ou rampes fixes. La rampe est adaptée à un seul véhicule de mobilité personnelle avec utilisateur.


La rampe a une limite de poids sûre de 272 kg. Elle est fabriquée en aluminium, ce qui lui confère solidité, durabilité et légèreté.

La rampe a une largeur généreuse de 72 cm et est disponible en différentes longueurs.

Positionnement de la rampe

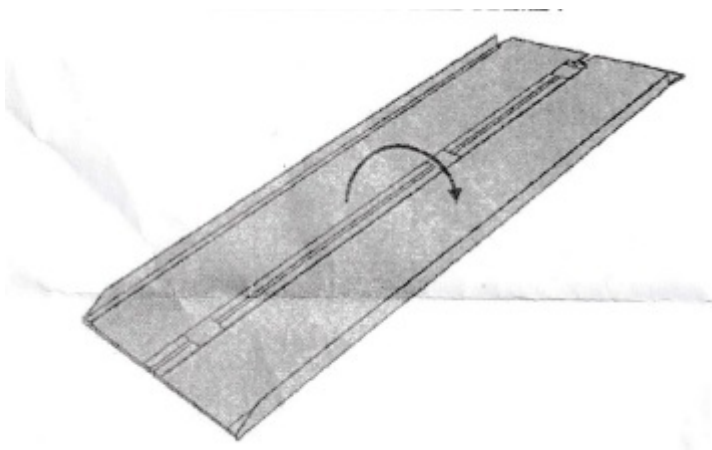

Transportez la rampe jusqu'à l'endroit voulu à l'aide de la poignée de transport. Déployez la rampe comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

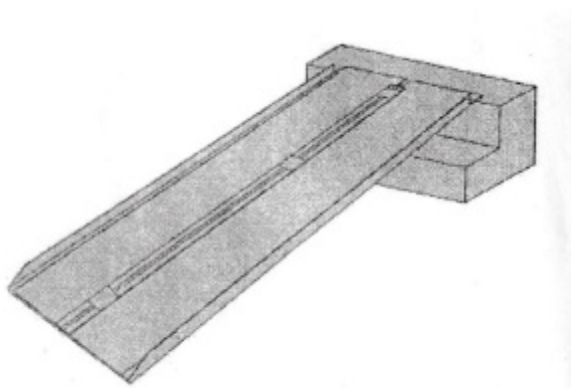


Positionnez la rampe de manière à ce que le haut de la rampe soit plus haut (le haut de la rampe est percé de deux trous). Il peut s'agir de la marche supérieure ou du rebord d'un coffre de voiture.

Le haut de la rampe est doté d'un rebord qui permet une utilisation sûre et confortable de la rampe. Veillez à ce que ce rebord soit entièrement sur la marche ou le coffre de la voiture et à 90° par rapport à l'objet (comme indiqué dans le diagramme ci-dessus).

Installation de la rampe

La rampe peut être installée de manière permanente. Fixez la rampe en utilisant les deux trous pré-perçés à l'avant de la rampe et les fixations appropriées. Toute installation doit être réalisée par un installateur compétent, tel qu'un ouvrier qualifié. Les deux trous sont illustrés ci-dessous.

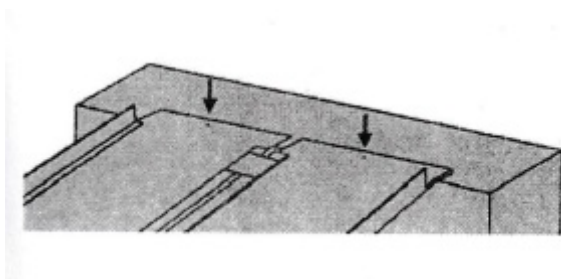

Précautions

Assurez-vous que la rampe est dépliée et bien positionnée avant de l'utiliser.

N'essayez pas d'utiliser les rampes sur des pentes supérieures à 25° (1:4) ou à la pente maximale du véhicule particulier, quelle qu'elle soit. Consultez la documentation de votre véhicule pour connaître sa pente maximale.

N'autorisez qu'une seule personne/un seul véhicule de mobilité à utiliser les rampes à la fois. Ne dépassez pas la charge de travail de la rampe.

N'utilisez la rampe que très lentement. Ne conduisez pas le scooter ou le fauteuil électrique à pleine vitesse, car cela pourrait causer des dommages et/ou des blessures.

Veillez à ce que la charge sur la rampe soit à peu près centrale entre les sections gauche et droite. Ne vous penchez pas par-dessus le bord du véhicule ou de la rampe lorsqu'ils sont utilisés.

Garantie

La garantie couvre les défauts de conception et de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages accidentels, les dommages causés par les intempéries ou l'usure. La rampe est garantie deux ans à compter de la date d'achat.